



leVrai
PROFESSIONNEL

MEDICAL

ACTIPUR NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES PAE**/(1)

Formule désinfectante à large spectre, prête à l'emploi, conforme aux protocoles d'hygiène pour la prévention contre les épidémies, idéale pour l'univers médical et les milieux sensibles.

Avantages produit

- Élimine 99,99 % des germes
- Nettoie et désinfecte tous types de surfaces hautes et petits objets non sensibles aux acides (2)
- À base d'acide lactique : un actif biocide 100 % biosourcé issu de la fermentation de sucres

Mode d'emploi

Pulvériser sur une lavette et nettoyer les surfaces, laisser agir 5 à 15min selon l'activité recherchée, essuyer. Rincer à l'eau potable lorsque les surfaces sont destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 19/12/2013). Utilisable sur vitres et inox. Rinçage recommandée pour les surfaces en inox.

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : fraîche et légère
C.O.V : 16 %
Masse volumique : 0,976 g/cm³
pH : 1,5 / 2,5
Produit biocide (AL) : TP2 et TP4.

Composition et emballage

Moins de 5%: agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques; désinfectant : acide lactique (CAS n°79-33-4 : 9,36 g/l); éthanol (CAS n°64-17-5 : 155,96 g/l). Contient aussi : eau, solvants, dénaturants (t-Butyl alcool, benzoate de denatonium). Enzymes. Parfum.

Ingrédients biosourcés : 99,90 %

Formule biodégradable : 99,9 % en 28 jours (OCDE 301)

Pulvérisateur issu de 66,43 % de plastique recyclé.
Bidon majoritairement recyclable.



Technologie BT™



Pulvérisateur 750mL : 6205
Bidon 5L : 6206



Contact
alimentaire
HACCP



Buse mousse
évite les
projections

Précautions d'emploi



ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle via un collecteur ou un organisme agréé.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

	750 mL	5 L
Code Action Pin	6205	6206
Gencod	3 519220 062059	3 519220 062066
Poids net	0,732 kg	4,88 kg
Poids brut	0,831 kg	5,12 kg
Dim. uv en mm	L. 117 x l. 65 x H. 245	L. 186 x l. 126,5 x H. 291
Nb uv / carton	6	4
Palettisation	5 couches de 20 cartons soit 100 cart. par palette / 600 uv par palette	4 couches de 8 cartons soit 32 cart. par palette / 128 uv par palette

Fabriqué en France



**Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. (1) Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur <https://detergents.ecocert.com> (2) Rinçage recommandé sur les surfaces en inox. Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux acides comme le marbre, le béton, le ciment, les bois huilés ou cirés, etc. Il est recommandé de tester la compatibilité des matériaux sur une surface peu visible avant toute première utilisation. (3) Produit de nettoyage et de désinfection des bâtiments en production végétale y compris zone de stockage, conforme selon le règlement européen UE 2018/848



leVrai
PROFESSIONNEL

MEDICAL

ACTIPUR NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES PAE**/(1)



Technologie BT™



Pulvérisateur 750mL : 6205
Bidon 5L : 6206

Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	DOSES	NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES
BACTÉRICIDE	PAE	NF EN 1276 en 5 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 16615 en 5min en conditions de propreté à 20°C
LEVURICIDE	PAE	NF EN 1650+A1 en 15 min en conditions de propreté à 20°C NF EN 13697 en 15 min en conditions de propreté à 20°C NF EN 16615 en 5 min en conditions de propreté à 20°C (usage avec lavette)
VIRUCIDE	PAE	NF EN 14476+A2 sur <i>Vaccine</i> en 5 min en conditions de propreté à 20 °C NF EN 14476+A2 sur <i>Adénovirus</i> et <i>Norovirus</i> en 30 min en conditions de propreté à 20 °C

Virus d'intérêt couverts par l'efficacité du produit

- *Coronavirus* (COVID-19)
- *Herpesviridae* (Herpès)
- VHB (Hépatite B)
- VHC (Hépatite C)
- VHD (Hépatite DELTA)
- VIH (Immunodéficience humaine)
- HTLV (Leucémie Humaine à Cellules T)
- Virus de la grippe
- Virus de la rubéole
- Virus de la rougeole
- Virus de la rage
- *Filoviridae* (Fièvre Hémorragique Aigüe)
- *Flavivirus* (maladies transmises par les moustiques : dengue, etc.)
- *Paramyxoviridae* (Oreillons)
- *Poxviridae* (infections cutanées)

Fabriqué en France